

„EASY-Taster 2“

Bedienungsanleitung





1. Inhalt

2.	Einleitung	3
3.	Lieferumfang	3
4.	Installation und Inbetriebnahme	4
5.	Verwendung des „EASY-Taster 2“	4
6.	Montageoptionen	5
7.	Entfernen und Wechseln des Deckels	6
8.	Batteriewechsel	8
9.	„EASY-Taster 2“ und Funk-Steckdose neu verbinden	11
10.	Sicherheitshinweise	13
11.	Rechtliche Hinweise	14
12.	Technische Spezifikationen	15
13.	Fehlerbehebung	16
14.	Kontakt und Kundendienst	18
15.	Garantiebedingungen für den „EASY-Taster 2“	19
16.	EU-Konformitätserklärung	20
17.	Hersteller des „EASY-Taster 2“	24

2. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres „EASY-Taster 2“.

Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um Menschen mit Unterstützungsbedarf eine selbstständige Steuerung elektrischer Geräte zu ermöglichen – einfach per Tastendruck. Der „EASY-Taster 2“ trägt dazu bei, die Selbstständigkeit zu fördern, Abhängigkeiten zu verringern und – wo relevant – Betreuungspersonen und Assistenten zu entlasten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um eine sichere und bestimmungsgemäße Nutzung zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anleitung gut auf – sie ist Bestandteil des Produkts.

3. Lieferumfang

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:



1x „EASY-Taster 2“



1x Funk-Steckdose (bereits mit dem „EASY-Taster 2“ verbunden)



2x Abdeckungen für Kippschalter



2x Klebepad



90cm Klettband



2x Schrauben

5. Installation und Inbetriebnahme

„EASY-Taster 2“

- Entnehmen Sie den „EASY-Taster 2“ aus der Verpackung.
- Der „EASY-Taster 2“ ist sofort einsatzbereit und bereits mit der mitgelieferten Funk-Steckdose gekoppelt.

Funk-Steckdose

- Stecken Sie die mitgelieferte Funk-Steckdose an eine vorhandene Steckdose ein.
- Stecken Sie das zu steuernde Gerät in die Funk-Steckdose ein.
- Achten Sie darauf, dass das zu steuernde Gerät eingeschaltet ist (z.B. falls vorhanden über einen Kippschalter, wie bei Stehlampen üblich).



6. Verwendung des „EASY-Taster 2“

Das zu steuernde Gerät einschalten: Drücken Sie den „EASY-Taster 2“, um die verbundene Funk-Steckdose einzuschalten. Das an die Funk-Steckdose angeschlossene Gerät wird nun mit Strom versorgt und somit eingeschaltet.

Das zu steuernde Gerät ausschalten: Drücken Sie den „EASY-Taster 2“ erneut, um die Funk-Steckdose auszuschalten. Das angeschlossene Gerät wird vom Strom getrennt und ausgeschaltet.

Hinweis: Der „EASY-Taster 2“ kann Geräte nicht aus dem Standby-Betrieb wecken. Geräte, die sich nach Stromzufuhr zunächst im Standby-Betrieb befinden, also z.B. auf das Einschalten durch eine Fernbedienung warten, werden **technisch bedingt nicht** vom „EASY-Taster 2“ unterstützt.

Wenn Sie auch Geräte aus dem Standby-Betrieb steuern möchten, empfehlen wir Ihnen unser erweitertes System „SteuerungPlus“.

Informieren Sie sich unter <https://hilfsmittel-mit-effekt.de> über unser Produkt „**SteuerungPlus**“. Damit lassen sich nahezu alle Geräte - insbesondere Fernseher, Stereoanlagen, Lichterketten und vieles mehr – per Tastendruck steuern sowie sehr individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

SteuerungPlus
per Fernbedienung



Hinweise zur Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Kippschalter des zu steuernden Geräts **dauerhaft auf "Ein"** steht, damit das Gerät bei Betätigung des „EASY-Taster 2“ aktiviert wird.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Abdeckungen für Kippschalter, um ein versehentliches Ausschalten des Geräts zu verhindern. Dies stellt sicher, dass das Gerät stets über den „EASY-Taster 2“ gesteuert wird. Insbesondere in Gemeinschaftseinrichtungen, in denen mehrere Personen Zugang zu den Räumlichkeiten haben, kann dies bei der Steuerung der Umgebung eine Herausforderung darstellen.
- Platzieren Sie den „EASY-Taster 2“ an einer für den Nutzer gut erreichbaren Stelle, um die Bedienung so einfach wie möglich zu machen. Verwenden Sie dazu das Klebepad, das Klettband oder schrauben Sie den „EASY-Taster 2“ an.



Mit diesen Schritten können Sie den „EASY-Taster 2“ effektiv nutzen, um die Funk-Steckdose ein- und auszuschalten und somit das zu steuernde Gerät ein- und auszuschalten.

7. Montageoptionen

Der „EASY-Taster 2“ kann auf verschiedene Arten montiert werden, um den individuellen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Hier sind die verfügbaren Optionen:

- **Klebepad:** Befestigen Sie den „EASY-Taster 2“ an einer glatten Oberfläche, indem Sie das mitgelieferte Klebepad verwenden. Hinweis: Klebepad vorab an einer unauffälliger Stelle testen, um Schäden zu vermeiden.
- **Klettband:** Nutzen Sie das mitgelieferte Klettband, um den „EASY-Taster 2“ an Objekten wie einem Pflegebett-Gitter (Siehe Bild), einem Rollstuhl oder einem anderen Möbelstück zu befestigen. Das Klettband ermöglicht eine flexible und wiederverwendbare Befestigung. Nutzen Sie das Klettband zur Befestigung und schneiden Sie das Überstehende Band einfach mit einer Schere ab.
- **Schraubbefestigung:** Der „EASY-Taster 2“ kann auch mit Schrauben befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben für den jeweiligen Untergrund um den „EASY-Taster 2“ sicher an einer festen Oberfläche zu montieren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen um Schäden am Gerät zu vermeiden.



- **„FLEXI-Halterung“:** Als Zubehör bieten wir die „FLEXI-Halterung“ für den „EASY-Taster 2“ an. Diese Halterung können Sie Schrauben, Kleben oder per Klettband festigen.
- Der „EASY-Taster 2“ kann dann einfach und sicher eingeklickt werden. Wird der „EASY-Taster 2“ schnell an einem anderen Ort gebraucht, kann er mit einem Handgriff aus der „FLEXI-Halterung“ genommen, und an einen anderen Ort gebracht werden.



Wählen Sie die Montageoption, die am besten zu Ihren Anforderungen passt, und stellen Sie sicher, dass der „EASY-Taster 2“ an einer für die Nutzer gut erreichbaren Stelle angebracht wird, um eine einfache Bedienung zu gewährleisten.

8. Entfernen und Wechseln des Deckels

Der „EASY-Taster 2“ ist so konzipiert, dass der Deckel je nach Geschmack oder Funktion ganz einfach ausgetauscht werden kann. So lässt sich der Taster individuell an die Vorlieben und Bedürfnisse der Nutzer anpassen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Deckel entfernen und wechseln	
Halten Sie den EASY-Taster 2 mit einer Hand seitlich an den beiden Flügeln fest.	
Greifen Sie mit der anderen Hand den Deckel und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn .	
Nach einem hörbaren „Klick“ können Sie den Deckel nach oben abnehmen.	

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Deckel entfernen und wechseln

Zum Aufsetzen richten Sie den Deckel so aus, dass er auf den äußeren Ring des EASY-Taster 2 passt.

Der Deckel kann in vier Positionen aufgesetzt werden (jeweils um 90° gedreht).



Nehmen Sie den Deckel und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn wieder zu bis Sie ein „Klick“- Geräusch hören.



Der Deckel des EASY-Taster 2 wurde korrekt gewechselt.




9. Batteriewechsel

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Batteriewechsel


Entfernen Sie den Deckel, wie in Abschnitt 7 beschrieben, so dass Sie den „EASY-Taster 2“ ohne Deckel vor sich liegen haben.




Lösen Sie mit dem mitgeliefertem Schraubendreher die drei gekennzeichneten Schrauben.

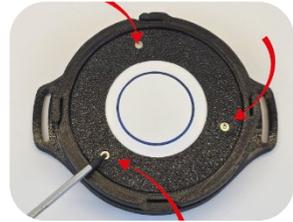

Entfernen Sie den innenliegenden Halte-Ring, indem Sie den EASY-Taster 2 vorsichtig umdrehen und entnehmen Sie den Funksender (erkennbar am blauen Boden).

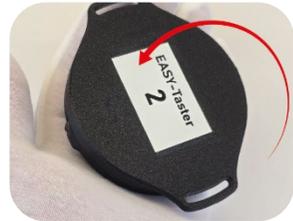

⚠ Achtung: Beim Umdrehen können der Halte-Ring sowie der Funksender herausfallen. Arbeiten Sie deshalb idealerweise auf einer weichen Unterlage, um Beschädigungen zu vermeiden.

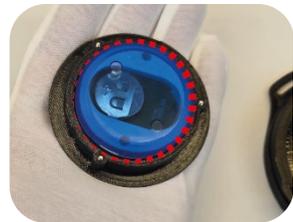


Öffnen Sie den Funksender, indem Sie das blaue Unterteil vorsichtig mit einem flachen Werkzeug ab-hebeln. Dafür befindet sich an der Seite des Senders eine kleine Kerbe im Kunststoffgehäuse.

Verwenden Sie am besten ein flaches Kunststoffteil (z. B. ein Spatel oder eine EC-Karte), um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.




Schritt-für-Schritt-Anleitung: Batteriewechsel

Ziehen Sie die Batterieeinheit im Funksender vorsichtig nach unten heraus.

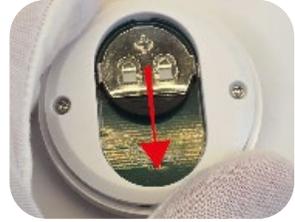

Entnehmen Sie die Batterieeinheit aus dem Gehäuse.

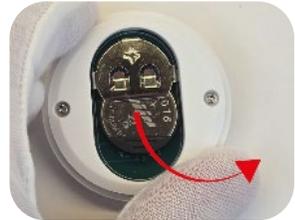

Die Batterieeinheit liegt nun vor Ihnen.



Entfernen Sie die alten Batterien aus der Gummihalterung und setzen Sie zwei neue **CR2016-Knopfzellen** ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität übereinanderliegen – der Pluspol jeder Batterie zeigt dabei nach oben.

⚠ Wichtig: Entsorgen Sie die alten Batterien umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften oder geben Sie sie bei einer Sammelstelle ab.



Legen Sie die Batterieeinheit wieder in den Funksender ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt fixiert sind und der Pluspol weiterhin nach oben zeigt.



Schritt-für-Schritt-Anleitung: Batteriewechsel

Schieben Sie die Batterieeinheit wieder bis ganz in die Batteriehalterung ein.




Drücken Sie die blaue Abdeckung wieder vorsichtig auf den Funksender, bis sie spürbar einrastet.



Legen Sie den Funksender wieder in den Boden des EASY-Taster 2 ein.



Legen Sie den zuvor entfernten Halte-Ring wieder in den EASY-Taster 2 ein und ziehen Sie die drei T6-Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubendreher fest an. Ein korrektes Anziehen der Schrauben sorgt dafür, dass alle Bauteile sicher sitzen und der Deckel später zuverlässig einrastet.

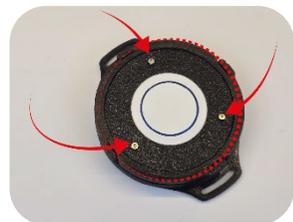

Montieren Sie den Deckel, indem Sie ihn so ausrichten, dass er auf den äußeren Ring des EASY-Taster 2 passt. Er kann in vier verschiedenen Positionen angebracht werden – jeweils in 90°-Schritten gedreht.



Schritt-für-Schritt-Anleitung: Batteriewechsel

Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören.



Die Batterie des EASY-Taster 2 wurde korrekt gewechselt.



10. „EASY-Taster 2“ und Funk-Steckdose neu verbinden

Lesen Sie auch die detaillierten Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Funk-Steckdose. Diese liegt der Verpackung des „EASY-Taster 2“ bei und ist auf unserer Website zu finden.

„EASY-Taster 2“ und Funk-Steckdose neu verbinden

Stecken Sie die mitgelieferte Funk-Steckdose in eine Steckdose ein.



Achten Sie darauf, dass das rote Licht der Funk-Steckdose **nicht leuchtet (die Funk-Steckdose also ausgeschaltet ist)**. Schalten Sie sie gegebenenfalls aus.



„EASY-Taster 2“ und Funk-Steckdose neu verbinden

Halten Sie den An/Aus-Knopf der Funk-Steckdose für ein paar Sekunden gedrückt, bis das rote Licht der Funk-Steckdose durchgehend leuchtet.



Halten Sie den „EASY-Taster 2“ in die Nähe der Funk-Steckdose und drücken Sie ihn.

Das rote Licht der Funk-Steckdose beginnt zu blinken und erlischt dann.



Die Funk-Steckdose ist jetzt mit dem „EASY-Taster 2“ verbunden und kann ab sofort damit ein- und ausgeschaltet werden.

11. Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise: Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise der Funk-Steckdose. Der Hersteller der Funk-Steckdose ist Huizhou Zhenxin Electronic Technology Co., Ltd.

Korrekte Montage: Achten Sie auf eine korrekte Montage des „EASY-Taster 2“ und der Funk-Steckdose, um eine sichere und zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Schützen Sie die Geräte vor Feuchtigkeit.

Leistungsgrenze: Schließen Sie niemals Geräte mit einer Leistungsaufnahme von mehr als 2000W an die Funk-Steckdose an, da dies zu einer Überlastung und möglichen Brandgefahr führen kann. Typische Hochleistungsgeräte wie Heizlüfter, Föns oder Mikrowellen überschreiten diese Grenze und dürfen nicht angeschlossen werden. Prüfen Sie dazu insbesondere auch die mitgelieferte Bedienungsanleitung der Funk-Steckdose.

Mechanische Belastung: Stellen Sie sicher, dass der „EASY-Taster 2“ und die Funk-Steckdose nicht von Rollstühlen, Pflegebetten (Auf- und Abfahren beachten), Patientenliftern oder anderen schweren Geräten überfahren oder beschädigt werden. Achten Sie darauf, die Geräte nicht zu beschädigen.

Beschädigte Geräte: Der „EASY-Taster 2“ und die Funk-Steckdose dürfen nicht verwendet werden, wenn Sie Anzeichen einer Beschädigung aufweisen oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Nehmen Sie den „EASY-Taster 2“ oder die Steckdose sofort außer Betrieb und nehmen Sie dann Kontakt mit unserem Kundendienst auf. Ebenso dürfen keine defekten Geräte in die Steckdose eingesteckt werden.

Umgebungstemperatur beachten: Vermeiden Sie den Einsatz des „EASY-Taster 2“ und der Funk-Steckdose in extremen Umgebungsbedingungen, insbesondere bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Betriebstemperaturbereichs (0°C bis 40°C). Extreme Temperaturen können die Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

Verwendung im Freien: Der „EASY-Taster 2“ und die Funk-Steckdose sind für den Innenbereich konzipiert und sollen nicht im Freien verwendet werden. Schützen Sie die Geräte vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Feuchtigkeit und anderen Wetterbedingungen.

Verwendung bei Feuchtigkeit: Der „EASY-Taster 2“ und die Funk-Steckdose sind für den Innenbereich konzipiert und dürfen nicht verwendet werden, wenn sie feucht oder nass sind.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mehrfachsteckdosen: Vermeiden Sie den Anschluss der Funk-Steckdose an eine Mehrfachsteckdose, die bereits mehrere Geräte versorgt, um eine Überlastung zu vermeiden. Schließen Sie die Funk-Steckdose direkt an eine Wandsteckdose an, um die Sicherheit zu maximieren.

Kinder- und haustiersicher: Bewahren Sie den „EASY-Taster 2“ und die Funk-Steckdose außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Diese Geräte sind keine Spielzeuge und sollten nur von autorisierten Personen bedient werden, um Fehlbedienungen und mögliche Gefahren zu vermeiden.

Periodische Überprüfung: Überprüfen Sie den Zustand des „EASY-Taster 2“ und der Funk-Steckdose regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen. Bei Anzeichen von

Beschädigungen, wie Rissen im Gehäuse oder Funktionsstörungen, sollte das Gerät sofort außer Betrieb genommen und durch ein neues ersetzt werden.

Haftungsausschluss: Wir, die Lösungen mit Effekt GmbH, übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Benutzerfehler, unsachgemäße Anwendung oder Gewalteinwirkung entstehen. Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigenes Risiko. Die Lösungen mit Effekt GmbH haftet nicht für Nutzung oder Nicht-nutzung des Produkts.

Aufsichtspflicht: Assistenten müssen während der Nutzung des „EASY-Taster 2“ die Aufsichtspflicht wahren und den korrekten Umgang mit Strom und den Geräten überwachen. Der „EASY-Taster 2“ schaltet potenziell lebensgefährliche Netzspannung an der Steckdose und kann gefährliche Geräte steuern, abhängig davon, was eingesteckt ist. Es ist daher unerlässlich, stets für Sicherheit zu sorgen und den Gebrauch durch die Nutzer zu überwachen. Achten Sie darauf keine gefährlichen Geräte, Geräte, die sich bewegen können oder könnten oder Geräte die Wärme oder Kälte abgeben oder abgeben können mit dem „EASY-Taster 2“ zu steuern. Der „EASY-Taster 2“ ist dafür vorgesehen insbesondere Lampen zu steuern.

12. Rechtliche Hinweise

Herstellerinformationen: Der Hersteller der Funk-Steckdose und des Funk-Senders im „EASY-Taster 2“ ist Huizhou Zhenxin Electronic Technology Co., Ltd. Die Lösungen mit Effekt GmbH ist Hersteller des Gehäuses für den Funksender.

Grenzen der Nutzung: Der „EASY-Taster 2“ ist keine Überwachungseinrichtung und dient nicht als verlässliche Notruf-einrichtung oder anderweitig um verlässlich Hilfe zu rufen oder auf eine Notlage aufmerksam zu machen. Es ist technisch möglich, dass ein Tastendruck die Steckdose nicht erreicht und das gewünschte Schalten ausbleibt!

Produkthaftung: Die Haftung des Herstellers für Schäden, die durch Produktmängel entstehen, richtet sich nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG). Die Haftung des Herstellers oder Verkäufers für andere Schäden, insbesondere solche, die durch unsachgemäße Verwendung, Änderungen am Produkt oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, ist ausgeschlossen.

Garantie und Gewährleistung: Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung und korrekter Installation des Produkts. Jegliche Veränderungen oder unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Geltendmachung der Garantieansprüche muss der Original-Kaufbeleg vorgelegt werden. Die Garantie umfasst keine Verschleißteile wie Batterien oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Handhabung, Unfälle, Missbrauch oder unsachgemäße Reparaturen verursacht wurden.

Haftungsausschluss: Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung, Benutzerfehler oder Gewalteinwirkung entstehen. Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigenes Risiko.

Exportbeschränkungen: Dieses Produkt darf nicht in Länder exportiert werden, die aufgrund von Exportkontrollvorschriften der Europäischen Union oder nationalen Gesetzen Beschränkungen unterliegen. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass alle geltenden Exportgesetze und -vorschriften eingehalten werden.

Datenschutz und Sicherheit: Der „EASY-Taster 2“ verwendet Funktechnologie zur Steuerung der angeschlossenen Geräte. Es wird empfohlen, das Produkt in einem sicheren Netzwerkumfeld zu betreiben, um das Risiko unerlaubter Zugriffe zu minimieren. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unbefugten Zugriff auf das Funksignal entstehen.

Internationale Vorschriften: Dieses Produkt wurde für den Einsatz innerhalb der Europäischen Union entwickelt und entspricht den dort geltenden Vorschriften. Der Einsatz in anderen Ländern erfolgt auf eigenes Risiko und unterliegt den jeweiligen lokalen Bestimmungen, die gegebenenfalls zusätzliche Anforderungen stellen.

Entsorgung: Bitte entsorgen Sie das Produkt und die Batterien gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische Geräte und Batterien. Als Verkäufer sind wir verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer zurückzunehmen. Sie können das Gerät und die Batterien kostenlos an uns zurücksenden oder bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst. WEEE-Reg.-Nr. DE 23133680

13. Technische Spezifikationen

„EASY-Taster 2“:

- Batterietyp: 2 x CR2016
- Funkfrequenz: 433,92 MHz
- Reichweite: bis zu 30 Meter (abhängig von Umgebungsbedingungen)
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Hersteller des Funk-Senders: Huizhou Zhenxin Electronic Technology Co., Ltd
- Hersteller des „EASY-Taster 2“
- Maße: 105 mm x 90 mm x 19 mm
- Gewicht: 110g
- Material: PETG



Funk-Steckdose:

- Spannung: 230V, 50Hz
- Maximale Belastung: 16A, Siehe Bedienungsanleitung der Funk-Steckdose
- Funkfrequenz: 433,92 MHz
- Reichweite: bis zu 30 Meter (abhängig von Umgebungsbedingungen)
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Zertifizierungen: CE (Richtlinie 2014/53/EU, RED)
- Hersteller: Huizhou Zhenxin Electronic Technology Co., Ltd

14. Fehlerbehebung

Hier sind einige häufige Probleme und deren Lösungen, um sicherzustellen, dass Ihr „EASY-Taster 2“ und die Funk-Steckdose ordnungsgemäß funktionieren:

Problem: Die Funk-Steckdose reagiert nicht auf den „EASY-Taster 2“.

Lösungsmöglichkeiten:

- Überprüfen Sie die Batterien des „EASY-Taster 2“ und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
- Stellen Sie sicher, dass die Funk-Steckdose korrekt eingesteckt ist und die maximale Reichweite nicht überschritten wird.
- Stellen Sie sicher, dass keine starken Störquellen wie andere Funkgeräte oder elektronische Geräte in der Nähe sind.
- Koppeln Sie die Funk-Steckdose erneut mit dem „EASY-Taster 2“.

Problem: Das angeschlossene Gerät funktioniert nicht, obwohl die Funk-Steckdose auf den „EASY-Taster 2“ reagiert und ein- und ausschaltet.

Lösungsmöglichkeiten:

- Stellen Sie sicher, dass der (Kipp)-Schalter des zu steuernden Geräts auf "Ein" steht.
- Überprüfen Sie, ob die Funk-Steckdose korrekt funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass die maximale Belastung der Funk-Steckdose (2000W) nicht überschritten wird.

Problem: Die Verbindung zwischen „EASY-Taster 2“ und Funk-Steckdose ist verloren gegangen. Die Steckdose reagiert nicht mehr auf den „EASY-Taster 2“

Lösungsmöglichkeiten:

- Koppeln Sie den „EASY-Taster 2“ erneut mit der Funk-Steckdose gemäß den Anweisungen im Abschnitt „EASY-Taster 2“ und Funk-Steckdose neu verbinden“.

Problem: Der „EASY-Taster 2“ lässt sich nicht richtig montieren.

Lösungsmöglichkeiten:

- Überprüfen Sie die Befestigungsoptionen (Klebeband, Klettband, Schrauben) und stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass der „EASY-Taster 2“ fest, aber nicht zu stark befestigt wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Benötigen Sie eine individuell angepasste Einzel-Lösung? Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf – wir finden eine Befestigungsoption oder fertigen eine passende an!**

Problem: Der „EASY-Taster 2“ oder die Funk-Steckdose wurde beschädigt.

Lösungsmöglichkeiten:

- Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Bei Beschädigungen durch äußere Einflüsse wie Rollstühle oder Patientenlifter beachten Sie bitte, dass solche Schäden nicht unter die Garantie fallen.
- Entfernen Sie die beschädigten Geräte, ziehen Sie diese aus dem Verkehr und sorgen Sie dafür, dass auch Dritte keinen Zugriff mehr auf die beschädigten Geräte haben können.
- Wenden Sie sich an unseren Kundendienst – wir finden eine pragmatische Lösung.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder ein Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

15. Kontakt und Kundendienst

Unser Kundendienst steht Ihnen mit erfahrenen Fachkräften aus dem sozialen Bereich zur Verfügung. Wir verstehen Ihre Anliegen und finden schnelle und unkomplizierte Lösungen für Sie.

Kontaktmöglichkeiten:		
E-Mail	info@loesungen-mit-effekt.de	
Telefon / SMS / Whatsapp	+49 175 9512166	
Website	https://hilfsmittel-mit-effekt.de/kontakt-und-support/	

Egal, welches Anliegen Sie haben, unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen und sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem „EASY-Taster 2“ herausholen können.

16. Garantiebedingungen für den „EASY-Taster 2“

Garantiedauer:

Die Garantie für den „EASY-Taster 2“ gilt für die Dauer von einem Jahr ab dem Kaufdatum, das auf der Originalrechnung oder dem Kaufbeleg vermerkt ist.

Garantieabdeckung:

Die Garantie deckt Defekte und Funktionsstörungen ab, die auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Wir verpflichten uns, solche Defekte durch Reparatur, Ersatz oder, falls nötig, Rückerstattung zu beheben.

Garantieausschlüsse:

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Flüssigkeitseinwirkung, Gewalteinwirkung, unsachgemäße Öffnung, fehlerhafte Batterien oder andere unsachgemäße Handhabungen entstehen. Ebenso sind normale Abnutzungserscheinungen von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieabwicklung:

Bei Garantieansprüchen kontaktieren Sie bitte unseren Support über unsere Website hilfsmittel.loesungen-mit-effekt.de/hilfe-und-support, Telefon 0175/9512166 oder per E-Mail an info@loesungen-mit-effekt.de. Nach einer Diagnose per Telefon, Video-Call oder Foto senden wir Ihnen umgehend Ersatz zu und bitten um Rücksendung des defekten Geräts. Für Sie entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten. Das defekte Gerät muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Ersatzgeräts an uns zurückgesendet werden.

Geltungsbereich:

Diese Garantie gilt ausschließlich für Produkte, die in Deutschland erworben und genutzt werden.

Übertragbarkeit der Garantie:

Die Garantie ist auf den neuen Eigentümer übertragbar, falls das Produkt weiterverkauft wird. In diesem Fall bleibt der ursprüngliche Garantiezeitraum ab dem ersten Kaufdatum bestehen.

Haftungsausschluss:

Die Haftung von Hilfsmittel mit Effekt beschränkt sich auf die Bedingungen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Nebenschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung des „EASY-Taster 2“s entstehen.

Gesetzliche Rechte:

Die gesetzlichen Rechte der Verbraucher werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

17. EU-Konformitätserklärung



EU-Konformitätserklärung (Declaration of Conformity)

1 PRODUKTINFORMATIONEN

Produktname: EASY-Taster 2 – Funk-Taster (433,92 MHz, ERP < 10 mW), batteriebetrieben (2 × CR2016)

Modellvarianten: 18 Varianten, unterschieden durch den aufgesteckten Deckel:

Variante	SKU	GTIN
Schwarz – Licht	H6-1	04262502670105
Weiß – Licht	H6-2	04262502670303
Grau – Licht	H6-3	04262502670310
Blau – Licht	H6-4	04262502670327
Pink – Licht	H6-5	04262502670334
Rot – Licht	H6-6	04262502670341
Orange – Licht	H6-7	04262502670358
Gelb – Licht	H6-8	04262502670365
Grün – Licht	H6-9	04262502670372
Schwarz – Musik	H6-10	04262502670389
Weiß – Musik	H6-11	04262502670396
Grau – Musik	H6-12	04262502670402
Blau – Musik	H6-13	04262502670419
Pink – Musik	H6-14	04262502670426



Variante	SKU	GTIN
Rot – Musik	H6-15	04262502670433
Orange – Musik	H6-16	04262502670440
Gelb – Musik	H6-17	04262502670464
Grün – Musik	H6-18	04262502670457

Tabelle 1 Modellvarianten EASY-Taster 2

Hersteller:

Lösungen mit Effekt GmbH
 Lärchenweg 8
 85617 Aßling
 Deutschland

Produktbeschreibung: Barrierefreier Funk-Taster zur drahtlosen Schaltung haushaltsüblicher Geräte (z. B. Lampen, Musikanlagen), speziell konzipiert für Menschen mit eingeschränkter Motorik. Das Gerät besitzt ein robustes PETG-Kunststoffgehäuse mit austauschbarem Deckel (verschiedene Farben und Symbole je nach Variante). Im Inneren befinden sich ein vormontiertes 433,92 MHz-Funksendermodul (Modell „KT12“) des Herstellers „Huizhou Zhenxin Electronic Technology Co., Ltd.“ Das Gehäuse gewährleistet vollständigen Berührungsschutz aller elektronischen Komponenten. Die Stromversorgung erfolgt über zwei CR2016-Knopfzellen. Im Lieferumfang befindet sich ebenfalls eine vorkonfigurierte Funksteckdose als Empfänger (Modell „TDSocket“) des Herstellers „Huizhou Zhenxin Electronic Technology Co., Ltd.“

2 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die oben genannte Firma in alleiniger Verantwortung, dass der beschriebene **EASY-Taster 2** (inklusive aller Modellvarianten) den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie entspricht:

Nr.	Richtlinie	Titel
1	2014/53/EU	Richtlinie über Funkanlagen (RED)
2	2011/65/EU + (EU) 2015/863	RoHS – Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro-/Elektronikgeräten

Tabelle 2 Geltende EU-Richtlinien



Zur Konformitätsbewertung wurden folgende harmonisierte Normen angewandt, um die Erfüllung der einschlägigen Anforderungen nachzuweisen:

Art.	Norm	Ausg.	Kurzbeschreibung	Prüfbericht
3.1 a	EN 62368-1	2014 +A11:2017	Sicherheitsanforderungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik	KS2311S6214E01
3.1 b	EN 300 220-1	V3.1.1 (2017-02)	Kurzstreckenfunk (25 MHz–1 GHz) – Teil 1: Tech. Merkmale & Prüfverfahren	KS2311S6214E01
3.2	EN 300 220-2	V3.2.1 (2018-06)	Kurzstreckenfunk (25 MHz–1 GHz) – Teil 2: Spezifische Bedingungen	KS2311S6214E01
3.1 a/b	EN 62479	2010	Beurteilung EMF-Exposition für Geräte geringer Leistung	KS2311S6214E01

Tabella 3 Angewandte harmonisierte Normen – Richtlinie 2014/53/EU (RED)

Norm	Ausg.	Kurzbeschreibung	Nachweis / Bericht
EN IEC 63000	2018	Technische Unterlagen zur Material- und Stoffkonformität (RoHS)	Lieferanten-SVHC- & Materialnachweise der Lösungen mit Effekt GmbH

Tabella 4 Angewandte harmonisierte Normen – Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

3 NACHWEIS DER KONFORMITÄT

Die Einhaltung der wesentlichen Anforderungen wurde durch folgende Dokumente bestätigt:

- **Herstellerdokumentation:** CE-Prüfbericht und RED-Konformitätserklärung des Herstellers Huizhou Zhenxin Electronic Technology Co., Ltd. für das Funksendermodul „KT12“ sowie den Funkempfänger „TDSocket“.
- **Prüfbericht:** Nr. **KS2311S6214E01** der Prüfstelle **KSIGN (Guangdong) Testing Co., Ltd.** (Prüfbericht, welcher die Konformität mit den oben genannten Normen bescheinigt).

Hinweis: Die technischen Unterlagen gemäß der Richtlinie 2014/53/EU werden von der „Lösungen mit Effekt GmbH“ bereitgehalten und den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Verfügung gestellt.




4 UNTERZEICHNUNG

Ort, Datum: Abtling, 5. Mai 2025

Unterzeichnende:



Ingrid Sanftl – Geschäftsführerin, Lösungen mit Effekt GmbH

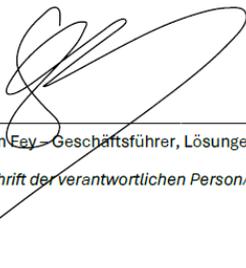

Sebastian Fey – Geschäftsführer, Lösungen mit Effekt GmbH

(Unterschrift der verantwortlichen Person/en)



18. Hersteller des „EASY-Taster 2“



Lösungen mit Effekt GmbH

Lärchenweg 8
85617 Aßling
HRB 286303
UST-ID: DE363254181

<https://loesungen-mit-effekt.de>

<https://hilfsmittel-mit-effekt.de>

+49175/ 95 12 166

info@loesungen-mit-effekt.de

